

ASTOFLO

PLUS



STIHLERELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH
Julius-Hölder-Str. 36 - 70597 Stuttgart - Germany
www.stihlerelectronic.de

NEW

ASTOFLO PLUS

NEW

Presentations Guide

Ett „MÅSTE“ för alla sjukhus !

VARFÖR ?

- Enkelt och tydligt handhavande
- För alla kliniska applikationer – **Värme fram till patientens kanyl!**
 - Operationsavdelningen (för rutinapplikationer)
 - IVA och uppvakningsavd.
 - Onkologi och Hemofiltrering
 - För blod och alla andra infusioner
- Totalt underhållsfri (endast regelbunden säkerhetstest.)
- Universalfäste (passar alla droppställningar, vägg, säng,)
- Unika värmeegenskaper tack vare:
 - Specialiserad värmeprofil.
 - Elektrisk värmeprofil med tre integrerade sensorer.
- Konstruktion av värmeprofil:
 - Inside: en massiv silikonkärna för effektiv värmekontakt med infusionsaggregatet.
 - Utsida: en skuminjicerad silikonisolering för att stå emot yttre kyla.

Observera: P.g.a. denna specialisolering “känns” temperaturen på utsidan kallare än den faktiska värmen inuti profilen.



- Silikon
- Mycket tåligt material

Snabbguide till ASTOFLO PLUS / Demonstration

- 1) Ha en infusionspåse eller flaska förberedd tillsammans med ett passande infusionsaggregat.
- 2) Fäst ASTOFLO PLUS på droppställningen (eller säng, IVA modulen etc)
=> Rekommendation: ASTOFLO PLUS skall fixeras så att den övre delen av apparaten sitter en bit under droppkammaren på infusionsaggregatet.



- 3) Placera värmeprofilen på baksidan av apparaten så att den ligger på universalfästet. Änden av värmeprofilen skall hänga ca. 1m ner. *Se redan nu till att värmeprofilen inte är "snurrad/tvinnad" så att infusionsaggregatet enkelt kan läggas in i profilen.*



- 4) Starta apparaten genom att trycka på ON-knappen. Välj temperatur (förinställd värme är alltid 41 °C) Bekräfta genom att trycka på startknappen igen.



- 5) Direkt efter start, greppa värmeprofilen med en hand och känn att profilen värms.



- 6) Efter max. 2 minuter
Lägg i infusionsaggregatet fr. patientsidan först, lämna infusionsaggregatet ca 5 cm utanför profilen för en bekväm övergång till kanylen.


Observera: Innan insättning av inf.aggregatet i profilen, kontrolleras att kanalen i profilen är öppen hela vägen.



7) Fixera värmeprofilen omgående i där för avsedd plats (svarta hållaren på sidan)



8) Vid patienten är det också viktigt att fixera profilen med tape, kardborrband el.dyl.

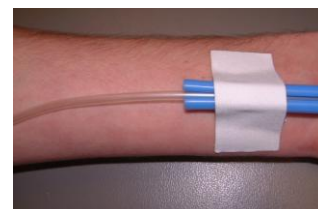

9) Det är fortfarande möjligt att visuellt kontrollera inf.aggregatet till patienten.

10) Om ett strömavbrott skulle inträffa, fortsätter ASTOFLO PLUS att arbeta med de värden som är inställda tills dess att strömmen återkommer, dock inte längre än 5 sekunder .

11) Enkelt att byta värmeprofilen

Rengöring och desinficering

1) ASTOFLO PLUS eller värmeprofilen får INTE autoklaveras

2) Tvätta alla ytor på ASTOFLO PLUS och värmeprofil med en mjuk trasa och en mild tvållösning.

3) Alternativt:

Använd desinficeringspray, använd endast alkoholbaserad spray med låg koncentration aldehyder (< 0.2%)

4) **VIKTIGT!**

ASTOFLO PLUS kan rengöras med ¼ % klorin. Värmeprofilen får ALDRIG rengöras med klorin!

METEKO AB

Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm

Tel. 08-88 03 60

Fax. 08-97 30 97

E-mail. marknad@meteko.se

Hemsida. www.meteko.se