



# Prisma

## ORC-/KOLLAGEN- OCH ORC-/SILVERFÖRBAND

PROMOGRAN PRISMA™ är en interaktiv sårbehandling som appliceras topiskt.

Produkten är en steril, frystorkad sammansättning av oxiderad regenererad cellulosa (ORC), kollagen och silver-ORC (en förening bestående av silver och ORC).

Vid kontakt med exsudat omvandlas PROMOGRAN PRISMA™ till en mjuk och anpassningsbar, biologiskt nedbrytbar gel, vilket möjliggör kontakt med alla delar av såret. Koksaltlösning bör användas för att fukta PROMOGRAN PRISMA™ på torra sår. PROMOGRAN PRISMA™formar sig efter såret och återbalanserar sårmiljön, främjar återväxt av frisk vävnad och skyddar mot mikrober.

## HUR?

- Antimikrobiell verkan – PROMOGRAN PRISMA™ skyddar sårbedden genom att kontrollera faktorer som kan fördröja sårhelningen.
- Oskadliggör kliniskt relevanta bakterier i förbandet i syfte att upprätthålla bakteriebalansen.
- Minskar bakterietillväxten, vilket bidrar till att minska infektionsrisken. Celltillväxt – PROMOGRAN PRISMA™ främjar tillväxt av frisk vävnad samtidigt som den skyddar mot mikrober.
- Kollagen ger en biologiskt nedbrytbar matris för cellinvasion och kapillärtillväxt. Skapar en miljö som främjar bildning av granuleringsvävnad, epitelialisering och optimal sårhelning.
- Den låga halten silver har ingen skadlig effekt på värdcellerna i en simulerad in vitro-modell.

## KLINISKA FÖRDELAR:

- Kostnadseffektiv eftersom färre förbandsbyten krävs jämfört med endast fuktig sårhelning.
- Snabbare sårslutning tack vare det unika verkningssättet jämfört med fuktig sårhelning.
- Förhindrar infektion i granuleringsfasen.
- Främjar tillväxten av frisk vävnad samtidigt som den kontrollerar bakteriebelastningen.
- Lätt att använda då förbandet är biologiskt nedbrytbart – behöver inte avlägsnas mellan förbandsbyten.

## INDIKATIONER

PROMOGRAN PRISMA™ är indicerad för hantering av alla sår som läker med sekundär intention och är fria från nekrotisk vävnad, inklusive

- diabetessår
- venösa sår
- trycksår
- sår orsakade av blandad kärl etiologi
- trauma- och operationssår,

PROMOGRAN PRISMA™ har påvisats besitta hemostatiska egenskaper.

PROMOGRAN PRISMA™ kan användas i samband med kompressionsbehandling.

## KONTRAINDIKATIONER

PROMOGRAN PRISMA™ är kontraindicerad hos patienter med känd överkänslighet mot komponenterna i denna produkt, dvs. ORC, kollagen och silver.

Avbryt användningen om tecken på överkänslighet uppträder. PROMOGRAN PRISMA™ är inte indicerad för patienter med omfattande brännskador.

Leverantör



## För mer information / Order

Meteko AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm  
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, [www.meteko.se](http://www.meteko.se)

### FÖRSIKTIGHET!

Systematisk antimikrobiell behandling bör övervägas vid uppenbar sårinfektion. PROMOGRAN PRISMA™ kan användas under medicinsk övervakning i samband med systematisk antibiotika.

### FÖRBEREDELSE

- Torr nekrotisk vävnad ska avlägsnas genom kirurgisk, enzymatisk eller autolytisk debridering före behandling.
- PROMOGRAN PRISMA™ kan användas när synliga tecken på infektion förekommer i sårområdet endast när korrekt medicinsk behandling angriper den underliggande orsaken. PROMOGRAN PRISMA™ är inte avsedd att fungera som ersättning för lämplig behandling av infektion.
- Fukta PROMOGRAN PRISMA™ med koksaltlösning för sår med lite eller inget exsudat.

### APPLICERING

- Applicera direkt på såret, så att hela sårbädden täcks.
- PROMOGRAN PRISMA™ bildar en gel vid kontakt med exsudat eller genom befuktning med koksaltlösning.
- För att en fuktig sårmiljö ska upprätthållas måste PROMOGRAN PRISMA™ täckas med ett sekundärt förband (t.ex. halvtäckande förband, täckande förband, gasvävsförband, icke-vidhäftande förband eller hydropolymerförband).

### BYTE OCH BORTTAGNING AV FÖRBAND

- Det är inte nödvändigt att avlägsna eventuella rester av PROMOGRAN PRISMA™ i samband med byte av förbandet eftersom den naturligt absorberas i kroppen med tiden
- Upprepa appliceringen med intervall på upp till 72 timmar, beroende på mängden exsudat.

Se produktens förpackningsinlaga för fullständiga arbets-anvisningar.

Artikelnummer	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
Promogran Prisma			
PS2028	28 cm <sup>2</sup>	10	720
PS2123	123 cm <sup>2</sup>	10	240