



Promogran

ORC-/KOLLAGENFÖRBAND

PROMOGRAN™ är en interaktiv sårbehandling som appliceras topiskt. Produkten är en steril, frystorkad sammansättning av oxiderad regenererad cellulosa (ORC) och kollagen. PROMOGRAN™ är den första och enda matris som kombinerar oxiderad regenererad cellulosa (ORC) och kollagen – en kombination med följande bevisade effekter: Främjar optimal sårhelingsmiljö. Övervinner den negativa effekten sårsvätskan har i kroniska sår på celltillväxten.

HUR?

- Den främjar celltillväxten effektivare än förband med endast kollagen.
- Den binder upp till tre gånger mer MMP:s i förbandet än endast kollagen eller ORC enskilt.
- Den binder och skyddar naturligt förekommande tillväxtfaktorer mot nedbrytning av överskott av proteaser. Tillväxtfaktorer frisätts till såret, medan de skadliga proteaserna förblir inaktiva vid biologisk nedbrytning av PROMOGRAN™.
- Endast PROMOGRAN™, som är en kombination av kollagen och ORC, binder och skyddar tillväxtfaktorer effektivare än sina två enskilda komponenter.

KLINISKA FÖRDELAR:

- Kostnadseffektivare eftersom färre förbandsbyten krävs jämfört med endast fuktig sårhelning. Snabbare sårhelning tack vare det unika verkningssättet jämfört med fuktig sårhelning.
- Snabbare bildning av granulansvävnad.
- Lätt att använda då förbandet är biologiskt nedbrytbart – behöver inte avlägsnas mellan förbandsbyten.
- Mindre smärta.

INDIKATIONER

PROMOGRAN™ är indicerad för hantering av alla sår som läker med sekundär intention och är fria från nekrotisk vävnad, inklusive

- diabetessår,
- venösa sår,
- trycksår,
- sår orsakade av blandad kärlpatologi,
- trauma- och operationssår.

PROMOGRAN™ har påvisats besitta hemostatiska egenskaper. PROMOGRAN™ kan användas i samband med kompressionsbehandling.

KONTRAINDIKATIONER

PROMOGRAN™ är kontraindicerad hos patienter med känd överkänslighet mot komponenterna i denna produkt, dvs. ORC och kollagen. Avbryt användningen om tecken på överkänslighet uppträder.

VARNINGAR:

Vid misstanke om infektion under behandling ska lämpligt antimikrobiellt förband, t.ex. ACTISORB™ med aktivt kol och silver, eller systematisk behandling användas. Inga säkerhetsrelaterade problem har hittills rapporterats i samband med trycksår, venösa sår och diabetessår.

Leverantör



För mer information / Order

Meteko AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se

FÖRBEREDELSE

- Torr nekrotisk vävnad ska avlägsnas genom kirurgisk, enzymatisk eller autolytisk debridering före behandling.
- PROMOGRAN™ kan användas när synliga tecken på infektion förekommer i sårområdet endast när korrekt medicinsk behandling angriper den underliggande orsaken.
- Fukta med koksaltlösning för sår med lite eller inget exsudat.

APPLICERING

- Applicera direkt på såret, så att hela sårbädden täcks. PROMOGRAN™ bildar en gel vid kontakt med exsudat eller fukta med koksaltlösning.
- Täck PROMOGRAN™ med ett sekundärt förband för att upprätthålla en fuktig sår läkningsmiljö.

ÅTERAPPLICERING

- Det är inte nödvändigt att avlägsna eventuella rester av PROMOGRAN™ i samband med förbandsbyte eftersom den naturligt absorberas i kroppen med tiden.
- Efter den första behandlingen bör såret återbehandlas med PROMOGRAN™ med intervall på upp till 72 timmar, beroende på mängden exsudat.

Se produktens förpackningsinlaga för fullständiga arbetsanvisningar.

Artikelnummer	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
Promogran			
M770285	28 cm ²	5	40 st
M771235	123 cm ²	5	40 st
M772028	28 cm ²	10	40 st
M772123	123 cm ²	10	40 st