



Tielle

TIELLE™-SERIEN: HYDROPOLYMERFÖRBAND

TIELLE™ är det överlägsna systemet för vätskehantering och upprätthåller en optimal fuktig sårmiljö för snabbare sårhäkning.

HUR?

När exsudat absorberas av förbandet utvidgas mittenområdet av hydropolymer och anpassar sig efter sårbäddens konturer, vilket minimerar ansamlingen av exsudat och risken för mase-ration.

Överbliven vätska absorberas av det uppsugande skiktet intill polyuretanskiktet.

Det unika polyuretanet spärrar in vätskan i skummets cellväggar på kemisk väg, även vid rörelser och tryck.

Stödsiktet är permeabelt för ånga, vilket gör att överskottsfukt kan förångas genom förbandets baksida, så att ytterligare exsudat kan absorberas och risken för mase-ration minimeras.

EGENSKAPER

- Innovativ produktsammansättning
- Uppsugande fiberskikt och mittenområde av hydropolymerskum.
- Varsamt vidhäftande kant.
- Baksida av polyuretan.

FÖRDELAR

- Hjälper till att upprätthålla en fuktig sårmiljö för snabbare läkning.
- Frekvensen för förbandsbyte är 43 % lägre än för tidigare behandlingar.
- Kontrollerar läckage och lukt för förbättrad livskvalitet för patienten.
- TIELLE™ absorberar upp till 30 gånger sin egen vikt i vätska.
- Avlägsnar överskottsfukt från sårstället.
- Fyller sårhålan medan det absorberar utan att fästa mot sårbädden.
- Kan lämnas kvar på plats upp till sju dagar, beroende på sårets tillstånd och exsudatnivå.
- Bakterie- och kontamineringsbarriär
- Låter överskottsvätska förångas genom skiktet, så att ytterligare exsudat kan absorberas, vilket minimerar graden av mase-ration.
- Hudvänligt avlägsnande med minimalt trauma, även för ömtålig hud.
- Lätt att applicera. Häftämnet gör det möjligt att flytta förbandet efter behov vid den första appliceringen, men sitter ändå kvar där det placeras.
- De vidhäftande varianterna kräver inget sekundärt förband och ingen tejp.

Leverantör



För mer information / Order

Meteko AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se

BEVIS

Effekten av framgångsrik hantering av exsudat påvisas av de överväldigande positiva resultat som konsekvent har uppnåtts för alla huvudsakliga sårtyper och olika exsudatnivåer hos tusentals patienter.

- 95 % läkning eller förbättring efter 4 veckors behandling med Tielle (resultatet för 6993 patienter).
- 100 % läkning med TIELLE™ Lite för behandling av akuta sår efter fyra veckor⁴.

PATIENTERNAS UPPLEVELSE

- TIELLE™ kan bäras i duschen.
- Flexibel och mjuk.
- TIELLE™ har ett unikt gel lim.
- Inget häftämne över sårkanten.
- Sitter kvar på plats utan att fästa vid sårbedden.
- Lätt att avlägsna utan trauma eller smärta.

SLUTSATS

Kostnadseffektiv sårvård handlar om att minska tiden för läkning, men även om att minska det antal förbandsbyten som krävs.

TIELLE™ uppnår dessa mål genom att tillhandahålla en kostnadseffektiv lösning med bevisad användningstid i praktiken på fyra dagar vid normal användning och upp till sju dagar, beroende på sårets tillstånd och exsudatnivå.

INDIKATIONER

TIELLE™ bör användas under ledning av sjukvårdspersonal för följande indikationer:

- trycksår
- diabetessår
- sår på de nedre extremiteterna
- venösa sår
- arteriella sår
- sår med blandad etiologi
- tagställen

TIELLE™ är lämpat för användning under tryckförband. TIELLE™ serien är indicerad för hantering av sår med olika mängder exsudat.

Artikelnummer	Storlek	Avd.förp.	Trsp.förp.
Tielle™ Classic			
MTL100	7 cm x 9 cm	10	5 (50 st)
MTL101	11 cm x 11 cm	10	5 (50 st)
MTL102	15 cm x 20 cm	5	5 (25 st)
MTL103	18 cm x 18 cm	5	5 (25 st)
MTL105	15 cm x 15 cm	10	5 (50 st)
MTL110	10 cm x 10 cm	20	5 (100 st)
Tielle™ för sacrum			
MTL104	18 cm x 18 cm	5	5 (25 st)
Tielle™ Packing			
MT2450	9,5 cm x 9,5 cm	10	5 (50 st)
Tielle™ Lite			
MTL300	7 cm x 9 cm	10	5 (50 st)
MTL301	11 cm x 11 cm	10	5 (50 st)
MTL308	8 cm x 15 cm	10	5 (50 st)
MTL309	8 cm x 20 cm	10	5 (50 st)
Tielle™ Plus			
MTP501	11 cm x 11 cm	10	5 (50 st)
MTP502	15 cm x 20 cm	5	5 (25 st)
MTP505	15 cm x 15 cm	10	5 (50 st)
Tielle™ Plus för hä			
MTP508	20 cm x 26,5 cm	5	5 (25 st)
Tielle™ Plus för korsben			
MTP506	15 cm x 15 cm	10	5 (50 st)
Tielle™ Xtra			
MTP301	11 cm x 11 cm	10	5 (50 st)
MTP302	15 cm x 20 cm	5	5 (25 st)
MTP305	15 cm x 15 cm	10	5 (50 st)



Leverantör



För mer information / Order

Meteko AB, Fågelviksvägen 9, 145 84 Stockholm
Tel. 08-88 03 60, Fax. 08-97 30 97, www.meteko.se